

# HAMA-Jet-Weekly™

## Aspirator Cleaner & Disinfectant, Weekly

### منظف أجهزة الشفط . أسبوعي

#### Features

For the Weekly cleaning and maintenance of Dental Aspirator Systems  
Can be used on wet line, dry line and semi wet/dry line suction systems

#### Aspirator Cleaner & Disinfectant

- Non-Foaming ■ Phenol Free ■ Colour coded ■ Chlorine Free
- Aldehyde Free ■ Non-Abrasive ■ Easy to use & measure
- Alkaline based for removal of Daily deposits

#### Instructions for use daily

Dispense 5% solution 50ml Hama-Jet  
Daily to 950ml warm water. Aspirate via the high and low volume suction tubes and also dispense into the spittoon bowl. Leave for a minimum of 10 minutes in order to activate the working properties and then rinse thoroughly with clean water.

#### Effective against

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Escherichia Coli (E-Coli), Pseudomonas aeruginosa Fungus, Enterococcus hirae, staphylococcus Aureus, HIV 1, Human influenza B virus (HIBV), aspergillus niger, Candida albicans Tested to all required EN Standards and according to DGHM guidelines

#### Caution

R43: May cause sensitization by skin contact, S2: Keep out of reach of children, S25: Avoid Contact with eyes, S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Do not use after expiry date

#### Composition

Contains Amongst other ingredients: Polyaminopropyl Biguanide, Less than 5% Nonionic surfactant, EDTA, Disinfectants.

#### الوصف

منظف ومطهر أسبوعي لأجهزة الشفط لوحدة الأسنان

#### المميزات

ذو فاعلية عالية في التنظيف والتطهير  
يستخدم مع جميع أجهزة الشفط سواء كانت جافة أو مائية أو مدمجة مائية وجافة يستخدم أيضاً لتنظيف مياصق وحدات الأسنان وكذلك فاصلات الأملجم لا يسبب رغاوي . لا يسبب تآكل للأجهزة . خالي من الفينول والكلور والأدهيد . سهل الاستعمال  
يزيل البروتينات والبقايا العضوية  
التأثير

يقضي على البكتيريا والفطريات والفيروسات مثل

- ستافيلوكوكس أوريوس للمقاومة للميثيسيلين وكذلك أي كولاي
- فطر سودو ارجينوزا ■ انتركولوكس هايري وستافيلوكوكس أوريوس ■ اسبيرجيلوس فيجر ■ كانديدا البيكانسي
- تم اختبارها تبعاً إلى EN مواصفات قياسية والى خطوات DGHM الخواص الفيزيائية

ذو رائحة مميزة ■ قابل للذوبان في الماء ■ العمر ٣ سنوات

التركيب يحتوي على حامض الستريك - سي ١٢-١٤ الكايل داي ميثيل أمونيوم كلوريد  
الاستعمال

اخلط ٥٠ ميلي من السائل تركيز ٥٪ مع ٩٥٠ ميلي من الماء ثم قم بالشفط خلال وصلتي الشفط العالي والمنخفض وكذلك ضع بعض المحلول في مبصقة الوحدة  
اترك السائل لمدة عشرة دقائق حتى يتم التنظيف والتطهير ثم قم بالشفط بالماء النظيف.

#### العبوات

عبوة ٥ لتر عبوة ١ لتر

# 5L

المصنع كل الحماية للصناعة

**Kol Al-Hamaya  
Factory for Industry**

P.O.Box:26316, Riyadh:11486, Saudi Arabia

Tel:+966(11)4458548, Fax:+966(11)4915906

Made in KSA صنع بالمملكة العربية السعودية



# HAMAYA®

e-mail: info@hamaya.co web: www.hamaya.co